Guide de mise en route rapide

Livraison standard

Vérifiez si toutes les pièces énumérées ci-après sont bien présentes :

- «LA-90»
- 1 batterie
- 1 bloc-secteur
- 1 insert noir
- 4 pieds en caoutchouc
- 1 pied de microphone
- 1 microphone col de cygne
- 1 câble XLR femelle/jack 3,5 mm
- 1 combiné d'écoute
- 1 cordon spiralé RJ/jack 3,5 mm
- 1 mode d'emploi LA-90 + guide de mise en route rapide LA-90 Set
- 1 certificat de garantie

En cas de livraison incomplète veuillez vous adresser à votre vendeur.

Préparation



Enfichez le microphone col de cygne dans le pied de micro, jusqu'à que celui-ci soit verrouillé.

Branchez le câble XLR femelle/jack 3,5 mm à l'arrière du pied de microphone.

2. Combiné d'écoute

Branchez le connecteur transparent RJ du cordon spiralé dans le combiné. Le combiné peut être reccroché sur le LA-90

3. Raccordement du micro et du combiné sur le LA-90

Raccordez la fiche jack 3,5 mm du microphone sur l'entrée micro du LA-90. **Important**: Placez le sélecteur du mode du prise de son sur la position basse. Si ce réglage n'est pas respecté, des sifflements (effet Larsen) peuvent apparaître.

Raccordez la fiche jack 3,5 mm du cordon spiralé du combiné sur la prise casque.

4. Alimentation

Branchez la fiche du bloc-secteur dans la prise d'alimentation à l'arrière du LA-90 et le boc-secteur dans une prise.

Mise en marche

Appuyez sur le bouton «I» pour allumer l'appareil («O» pour éteindre). Ajustez la sensibilité du microphone avec le curseur au-dessus de la prise micro.

Ajustez à l'écoute le niveau sonore dans le combiné avec le curseur au dessus de la prise casque.

Remarque: Lorsque le système est actif, le voyant marche/arrêt à l'arrière du LA-90 est vert et le voyant de contrôle à l'avant bleu. Le microphone de table et le combiné d'écoute sont opérationels.



